

Postup pri kalibrování senzora Glunovo

1. Zahrievanie senzora prebieha 190 minút

2. Po uplynutí 190 minút treba zadať hodnotu glykémie z glukomera ktorý používate - " prvá kalibrácia "
Najlepšie je zadávať kalibrácie keď ste nalačno a neprebíha zmena v glykémii, ste v pokojovom režime.

3. Druhú kalibráciu zadávate prvé ráno nalačno cez ikonku kalibrácia na displayi obrazovky aplikácie Glunovo
Kalibráciu zadávate iba v prípade keď je šípka pri hodnote glykémie na senzore vodorovne " → "

Nikdy nezadávajte kalibračnú glykémiiu keď sú pri hodnote glykémie na senzore šípky " ↑↑, ↓↓, ↘, ↗, ↑, ↓ " .

Nikdy nezadávajte viac kalibrácií v intervaloch kratších ako 4h

4. Tretiu kalibráciu zadávate večer na druhý deň

5. Potom už zadávate kalibráciu z glukomera každé ďalšie ráno nalačno keď je pri glykémii na senzore šípka " → "
ak je pri výsledku glykémie iná ako vodorovná šípka s kalibrováním čakajte

Dodržujte pitný režim počas platnosti senzora.

Ak máte zapožičaný vysielateľ treba ho po uplynutí platnosti senzora opatrne odložiť a odovzdať zástupcovy Lorex Distribution s.r.o.

1. deň - po 190min.

2. deň - ráno nalačno 1x , večer 1x

3. deň - ráno nalačno 1x , večer 1x

4. deň - ráno nalačno 1x , večer 1x

5. deň - ráno nalačno 1x , večer 1x

6. deň - ráno nalačno 1x , večer 1x

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. deň - ráno nalačno 1x , večer 1x

Glunovo SHARE

email :

heslo :