





# Ako používať Softvér Charder Insight pre PC

## 1 Zapojte kábel USB UA-010 do portov USB na zariadení a počítači

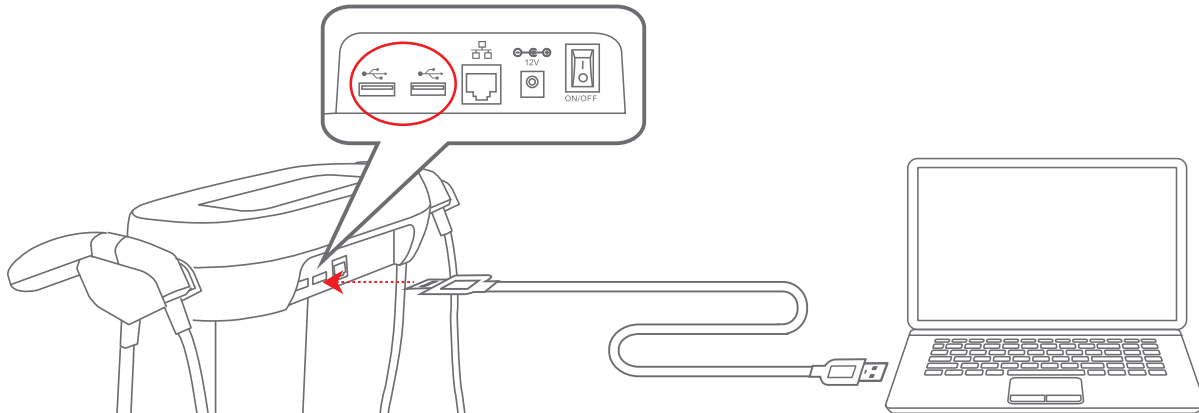

## 2 Potvrďte, že je prenos dát pre zariadenie „zapnutý“

Nastavenia → Prenos údajov → vyberte „Prenos z počítača“ a „Preniesť všetko“

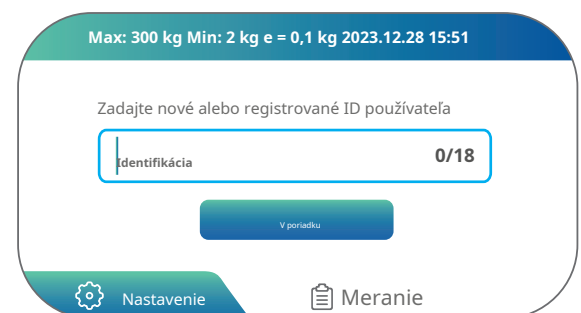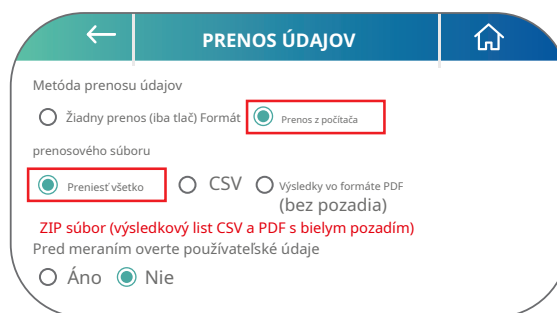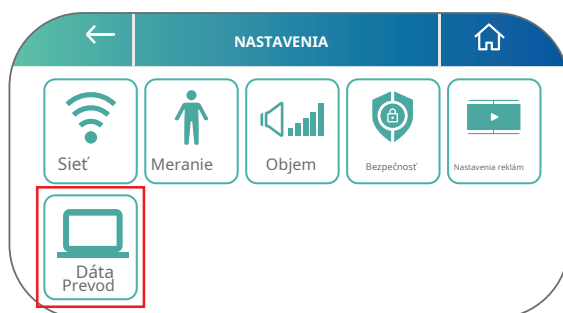


\*po dokončení vráťte zariadenie na domovskú obrazovku


## 3 Prihláste sa do Charder Insight

## 4 Vykonajte skenovanie zloženia tela

Vyberte používateľa → Skenovať → Spustiť skenovanie → Prijatý výsledok

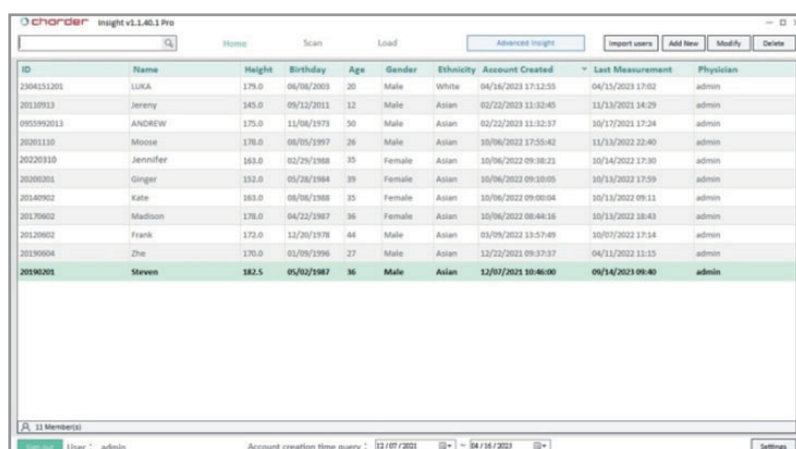

| ID         | Name     | Height | Birthdate  | Age | Gender | Ethnicity | Account Created     | Last Measurement | Physician |
|------------|----------|--------|------------|-----|--------|-----------|---------------------|------------------|-----------|
| 2004131201 | LUKA     | 179.0  | 06/06/2003 | 20  | Male   | White     | 04/14/2023 17:12:55 | 04/15/2023 17:02 | admin     |
| 20130913   | Jeremy   | 185.0  | 09/12/2011 | 12  | Male   | Asian     | 02/22/2023 11:32:40 | 11/13/2023 14:29 | admin     |
| 090590013  | ANDREW   | 175.0  | 11/06/1973 | 50  | Male   | Asian     | 02/22/2023 11:32:37 | 10/17/2023 17:24 | admin     |
| 20201110   | Moose    | 178.0  | 06/05/1997 | 26  | Male   | Asian     | 10/06/2022 17:55:42 | 11/13/2023 22:40 | admin     |
| 20220310   | Jennifer | 163.0  | 02/29/1988 | 35  | Female | Asian     | 10/06/2022 09:38:23 | 10/14/2023 17:30 | admin     |
| 20200201   | Ginger   | 152.0  | 05/26/1984 | 39  | Female | Asian     | 10/06/2022 09:10:05 | 10/13/2023 17:59 | admin     |
| 20140902   | Kate     | 163.0  | 06/06/1988 | 35  | Female | Asian     | 10/06/2022 09:00:04 | 10/13/2023 09:13 | admin     |
| 20170602   | Madison  | 178.0  | 04/22/1987 | 36  | Female | Asian     | 10/06/2022 08:46:16 | 10/13/2023 18:43 | admin     |
| 20130802   | Frank    | 172.0  | 12/20/1978 | 44  | Male   | Asian     | 03/09/2023 13:57:49 | 10/07/2023 17:14 | admin     |
| 20190604   | Zhe      | 170.0  | 02/09/1996 | 27  | Male   | Asian     | 12/22/2023 09:57:37 | 04/11/2023 13:15 | admin     |
| 20190201   | Steven   | 182.5  | 05/02/1987 | 36  | Male   | Asian     | 12/07/2023 10:46:00 | 09/14/2023 09:40 | admin     |

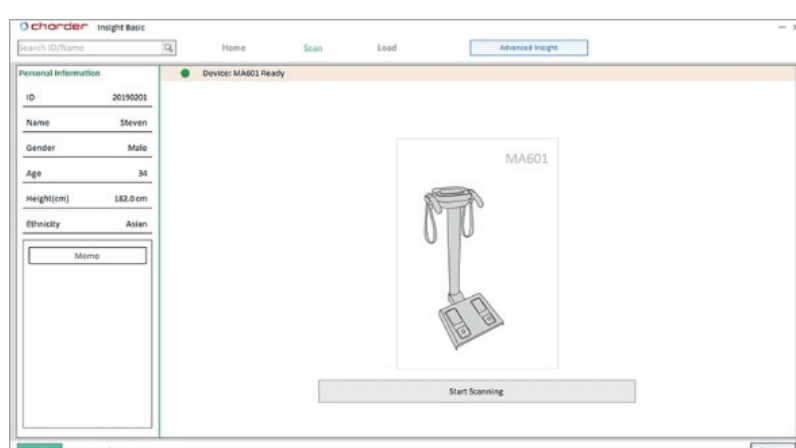

## Používanie režimu „Pro“

- Pre aktiváciu funkcií Charder Insight Pro zapojte Pro Key do USB portu na počítači.

